


Sử dụng chức năng phân tích phim mặt thẳng trên nền tảng Viceph như thế nào ?


Với những bệnh nhân có sự bất đối xứng khuôn mặt thì việc khảo sát bằng phim Cephalometric sẽ khó tìm ra được nguyên nhân chính xác. Trong những trường hợp này, phim sọ mặt thẳng sẽ là lựa chọn tối ưu nhất vì nó cho phép các bác sĩ đánh giá được một cách chính xác nguyên nhân gây ra sự lệch lạc của bệnh nhân.

Hiện tại, Viceph đã hỗ trợ các bác sĩ trong việc phân tích phim sọ mặt thẳng chỉ với vài bước sau đây.


Bước 1: Truy cập trang web <https://viceph.net/> trên trình duyệt của bạn, đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản (nếu chưa có).

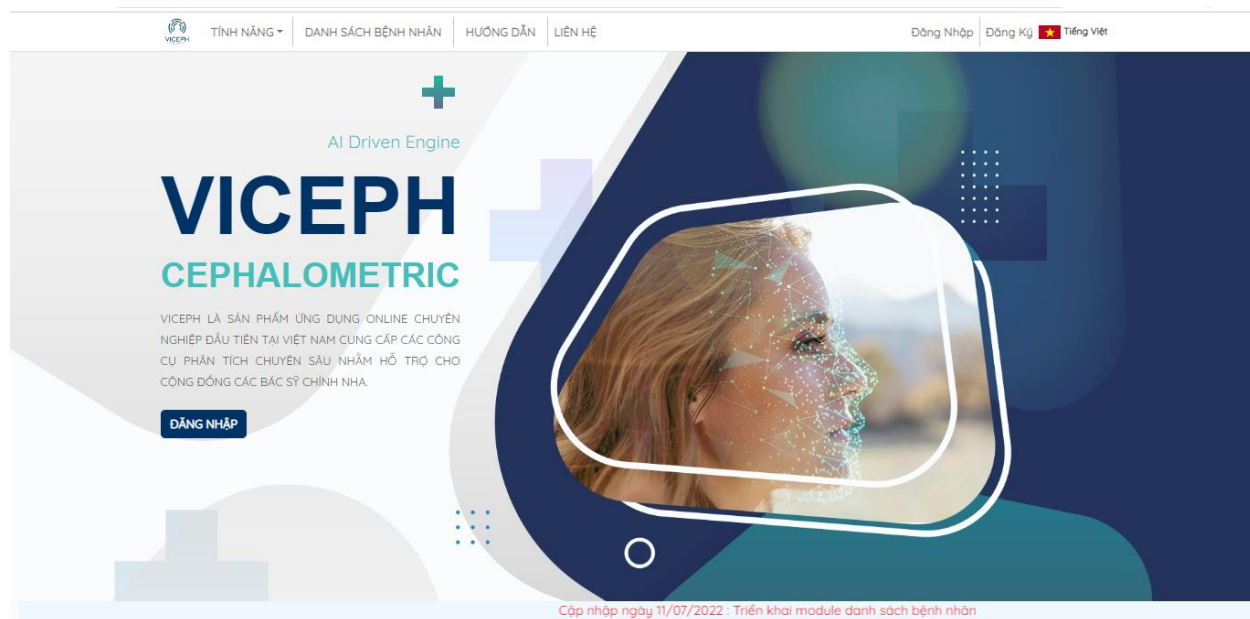

Bước 2: Chọn mục “**DANH SÁCH BỆNH NHÂN**” trên thanh công cụ chính. Bạn sẽ được chuyển sang giao diện danh sách bệnh nhân hiện tại của bạn. Tại đây, chọn vào biểu tượng “**Phân tích phim sọ mặt thẳng**” của bệnh nhân cần phân tích.

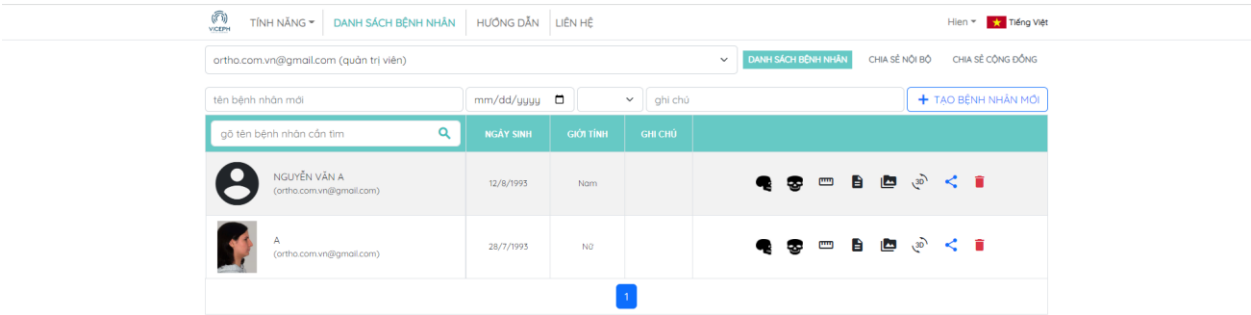


Danh sách bệnh nhân.

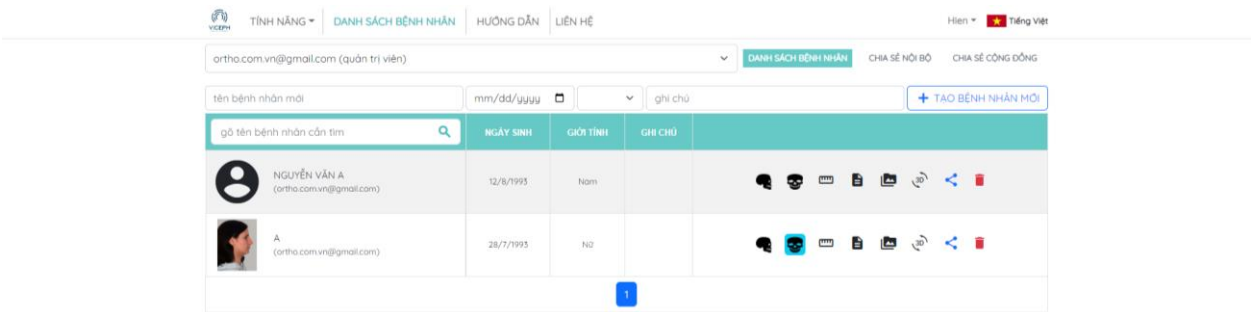


Chọn biểu tượng phân tích phim sọ mặt thẳng (Biểu tượng thứ 2)


Bước 3: Sau khi chọn, bạn sẽ được chuyển sang giao diện upload phim. Tại đây, nhấn vào khung để tải phim từ thiết bị của bạn. Chọn phim cần upload và nhấn **Open** hoặc kéo thả ảnh cần upload vào khung.

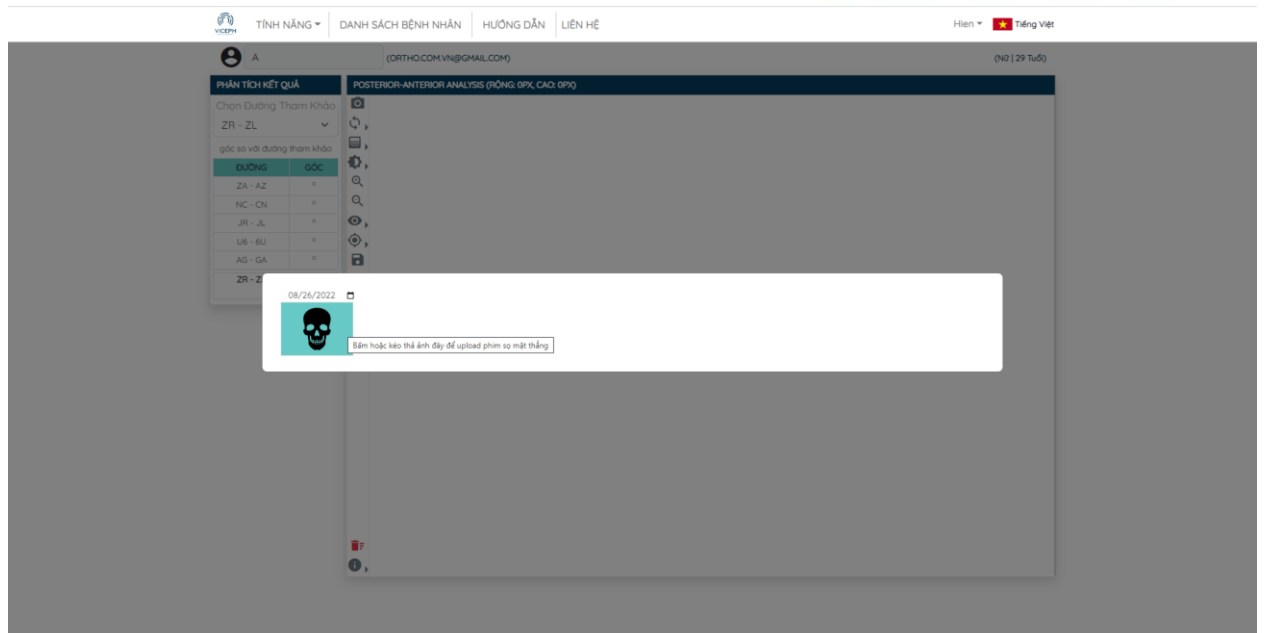

Giao diện upload phim.

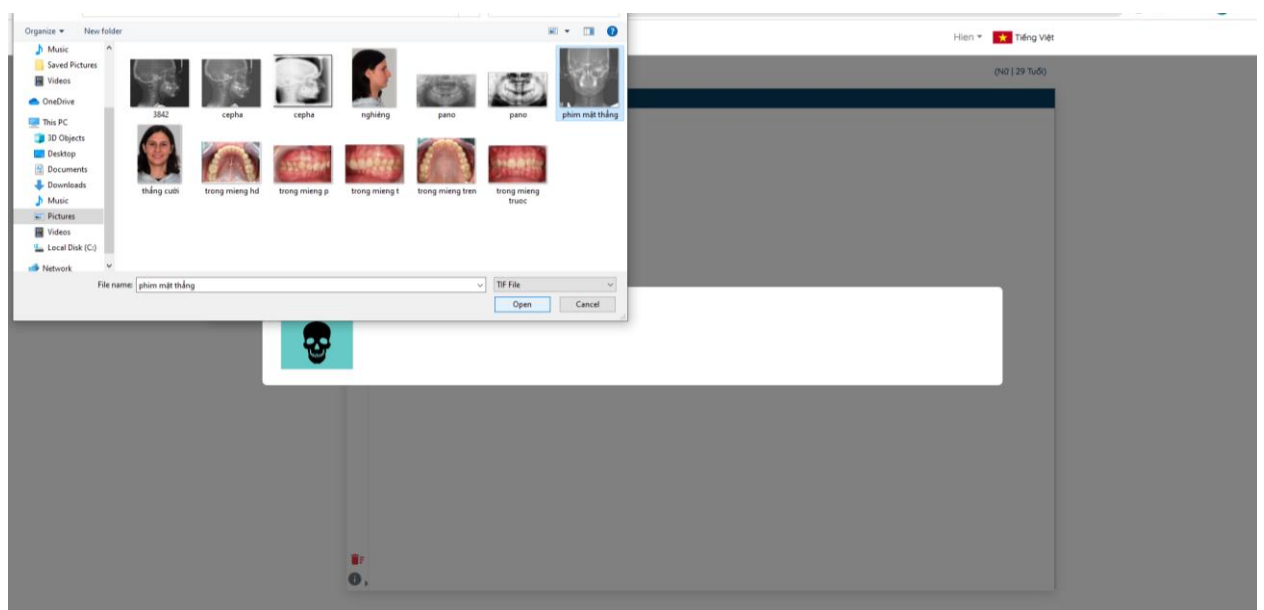


Chọn ảnh từ thiết bị → Open.

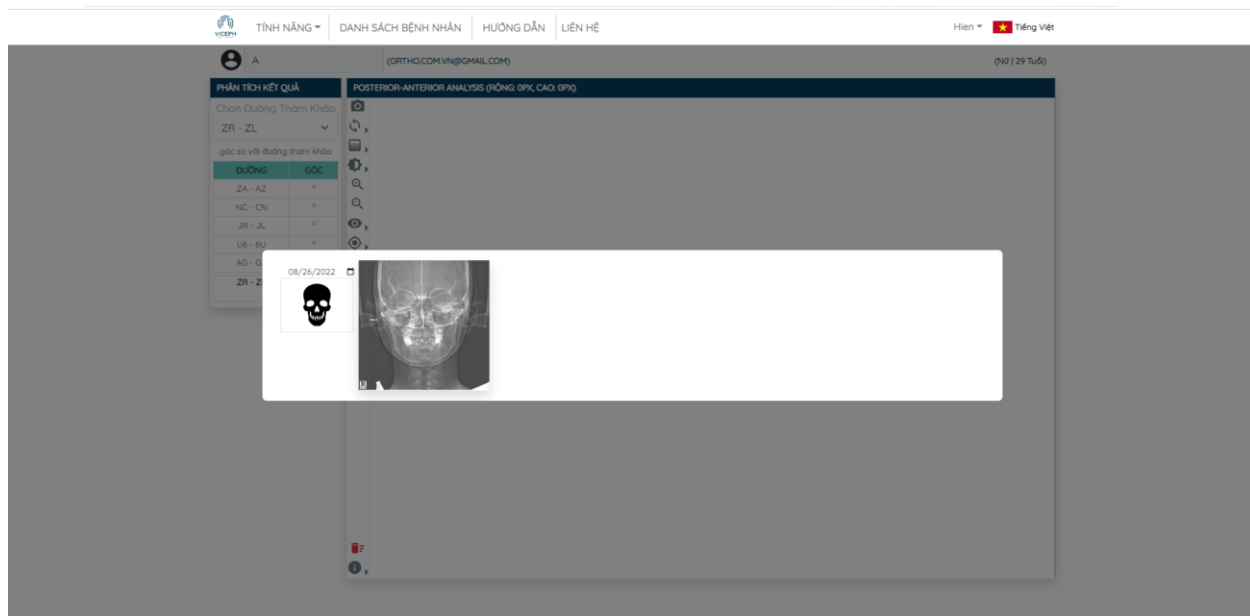


Upload phim thành công.


Bước 4: Sau khi tải phim thành công, click chuột vào phim vừa tải. Chọn biểu tượng **Marker list** trên thanh công cụ bên trái cửa sổ phim sẽ hiện ra danh sách các điểm cần xác định. Đánh dấu lần lượt các điểm trong danh sách lên phim.

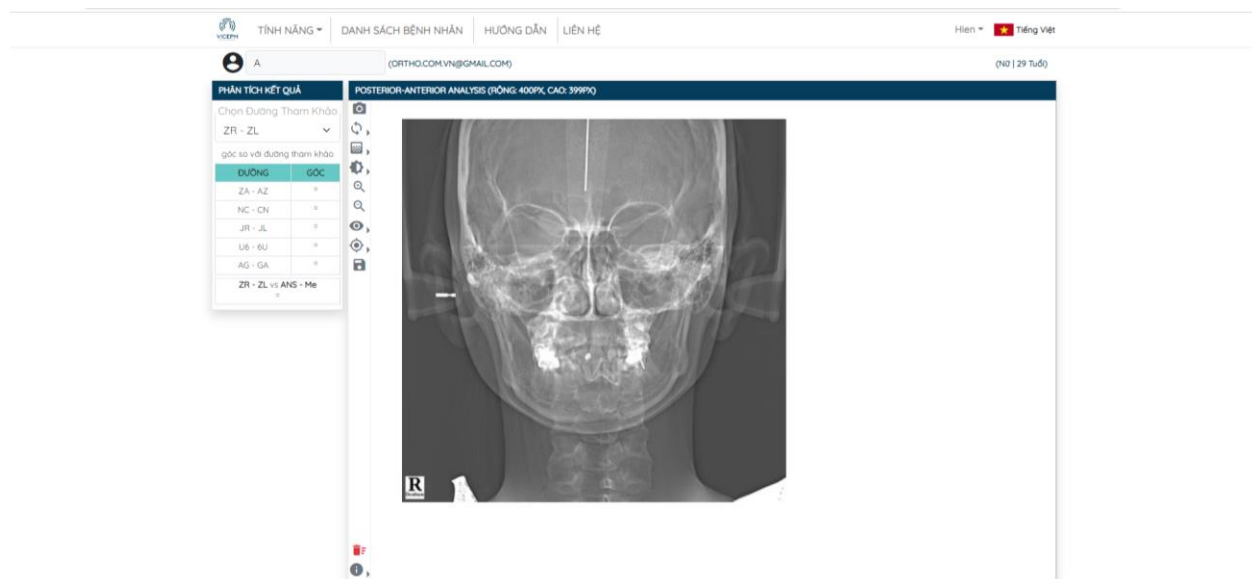

Giao diện đánh điểm.

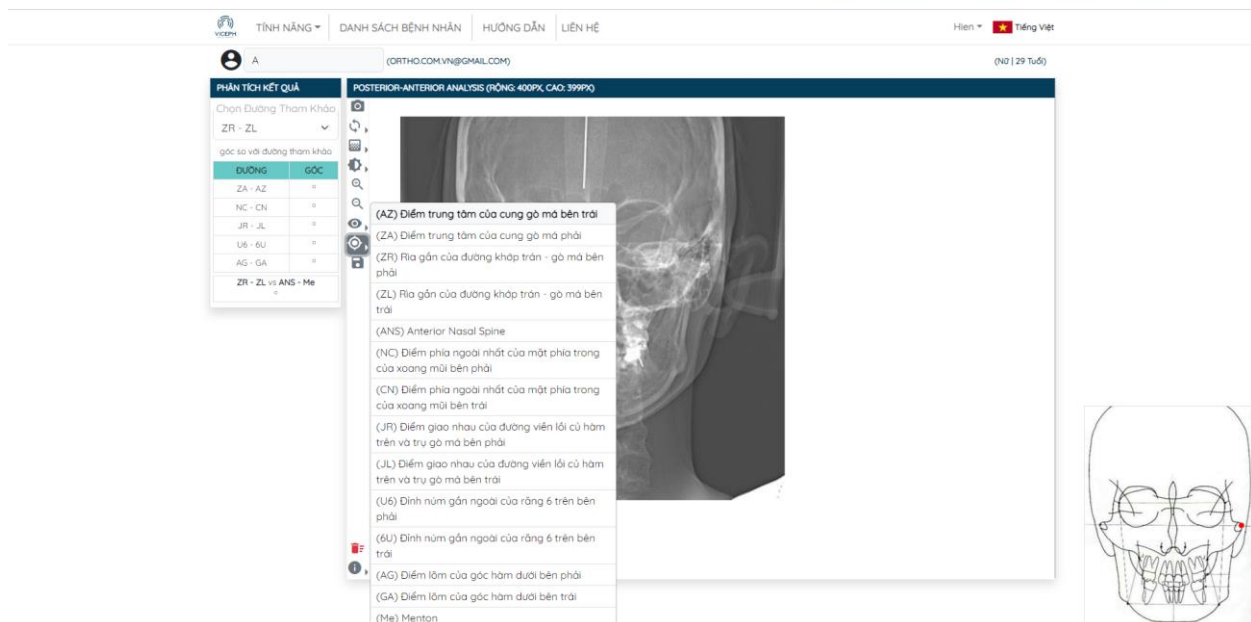


Biểu tượng Marker list (biểu tượng thứ 2 từ dưới lên).

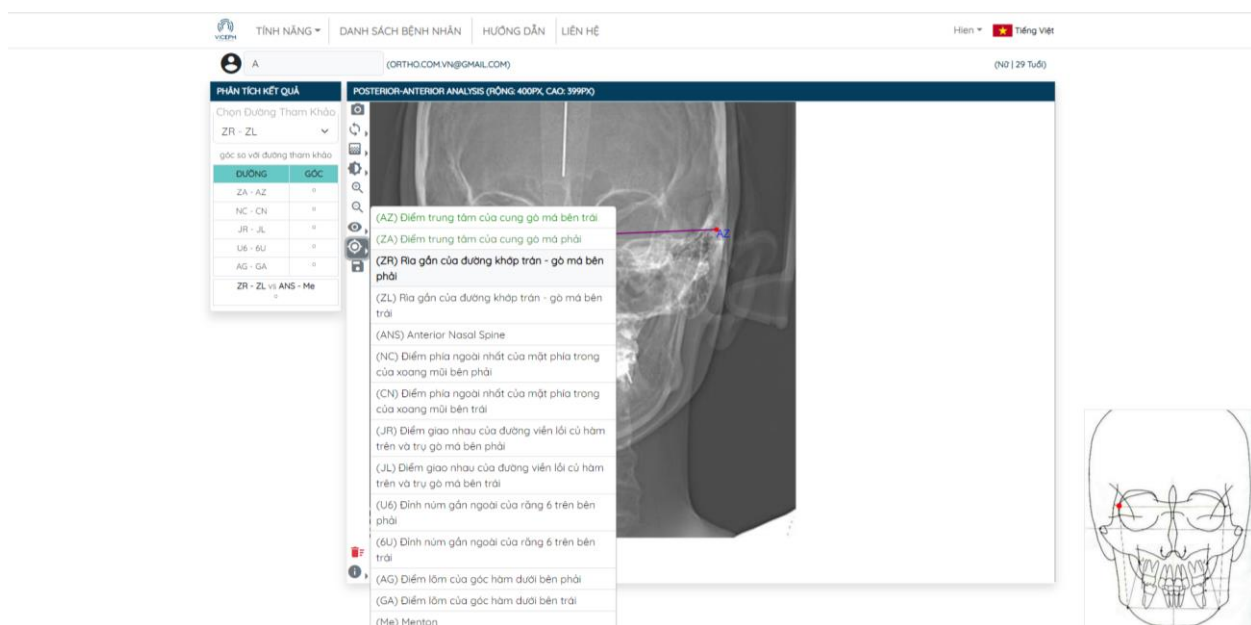


Đánh dấu các điểm lên phim.

Bước 5: Sau khi đánh xong điểm, chọn đường tham khảo mong muốn tại bảng phân tích kết quả. Phần mềm sẽ cho ra độ lệch của các đường đã tạo so với đường tham khảo, từ đó xác định được các điểm có sự lệch lạc trên phim phim.

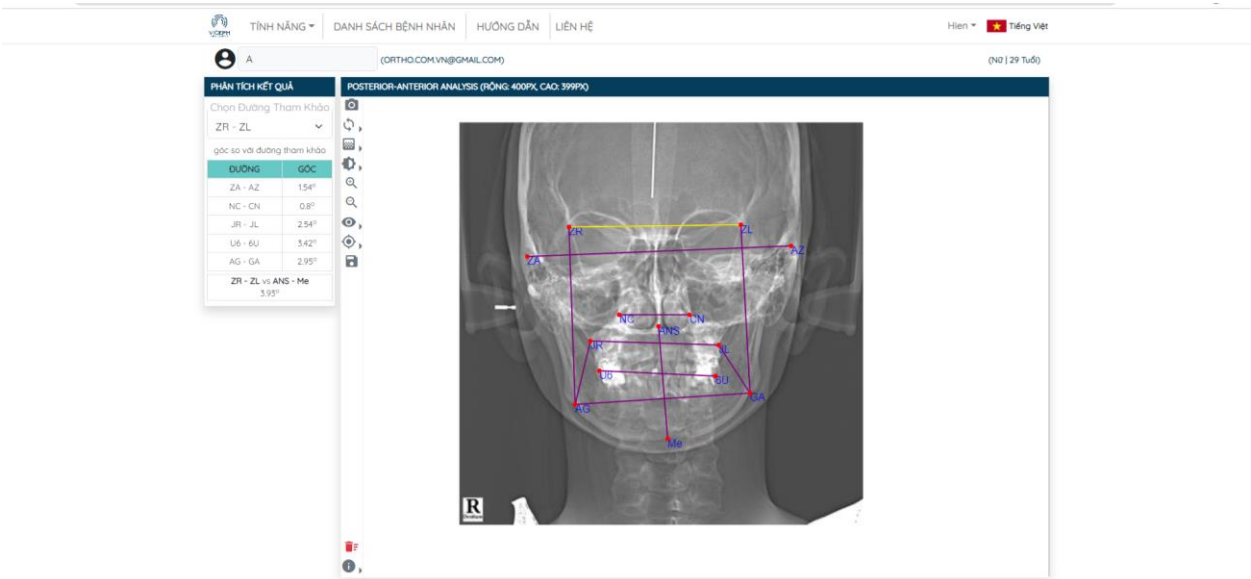

Các đường phân tích đã tạo.

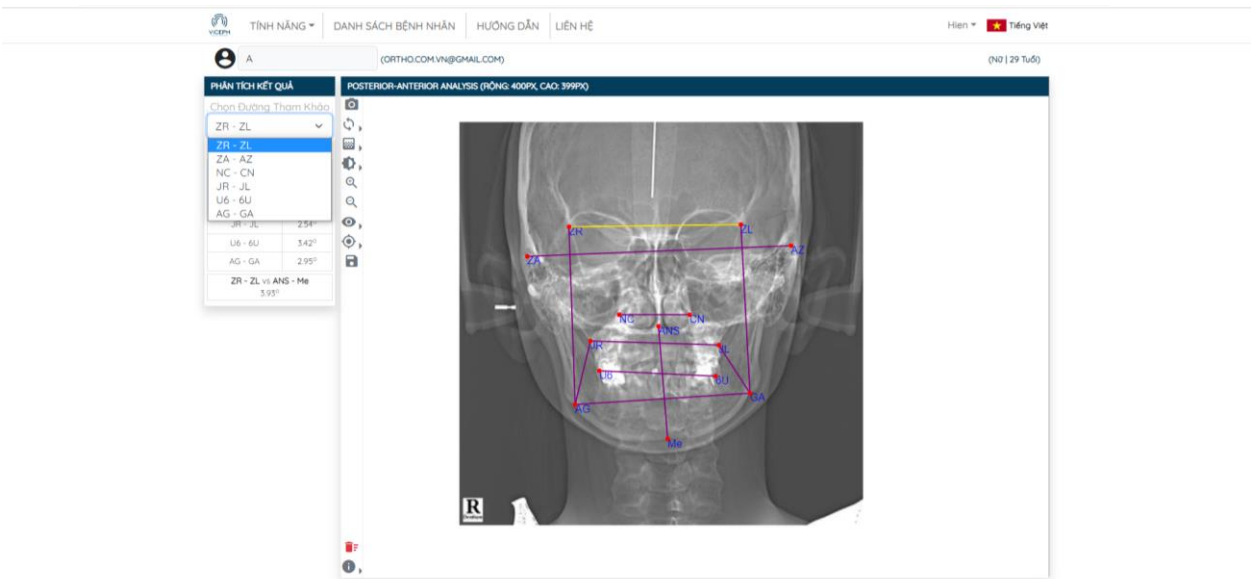

Chọn đường tham khảo.

Ngoài ra bạn còn có thể xem độ lệch của từng đường so với đường tham khảo trên phim bằng cách di chuyển chuột đến vị trí tên đường mong muốn trên bảng phân tích kết quả.

